





vac-clean uv 2[®]

Mini vacuum cleaner for hearing aids and hearables.



INSTRUCTION FOR USE

EN	INSTRUCTION FOR USE	2 - 3
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	4 - 5
FR	MODE D'EMPLOI	6 - 7
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	8 - 9
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	10 - 11
IT	ISTRUZIONI PER L'USO	12 - 13
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	14 - 15
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	16 - 17
TR	KULLANIM TALİMATI	18 - 19
DK	BRUGERVEJLEDNING	20 - 21
SE	BRUKSANVISNING	22 - 23
NO	BRUKSINSTRUKSJONER	24 - 25
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	26 - 27
CN	使用说明 (简体中文)	28 - 29
JP	取扱説明書	30 - 31

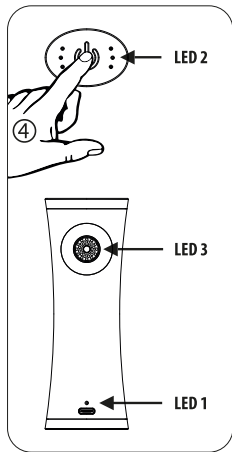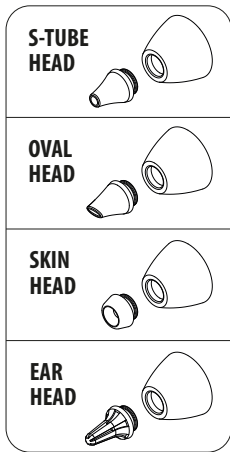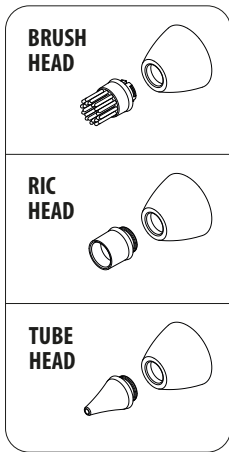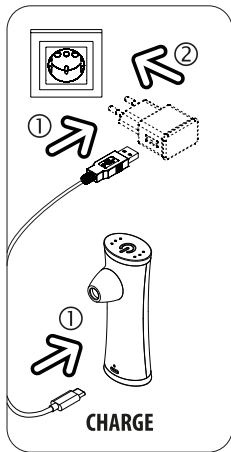

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pierwsze uruchomienie

1. Podłącz kabel USB do zasilacza USB (5 V/1 A), a wtyczkę USB-C do gniazda USB-C urządzenia vac-clean uv 2[®].
2. Następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. ⓘ LED 1 miga na zielono
 - Urządzenie vac-clean uv 2[®] zostanie naładowane w ciągu ok. 2,5 godziny i będzie działać przez ok. 2,5 godziny. ⓘ LED 1 świeci na zielono.

Praca z dyszami nasadowymi

3. Włóż dyszę nasadki odpowiednią do danego celu czyszczenia do nasadki bazowej.
4. Krótco dotknij przycisku I/O, a silnik odkurzacza uruchomi się na najwyższym poziomie ssania (ooo).
 - ⓘ LED 2 świeci się (ooo)
 - Niebieska dioda LED włącza się automatycznie, aby lepiej oświetlić czyszczone obszary. ⓘ LED 3 świeci się
 - Przesuń vac-clean uv 2[®] z lekkim naciskiem na wszystkie czyszczone obszary i odkurz brud.
5. Po zakończeniu czyszczenia wyłącz urządzenie, dotykając przycisku I/O przez co najmniej 3 sekundy.
 - ⓘ Wszystkie diody LED wyłączają się.

Konserwacja i pielęgnacja

Aby wyczyścić odkurzacz vac-clean uv 2[®], zalecamy przetarcie go wilgotną ściereczką. Po użyciu należy odkręcić nasadkę bazową z dyszą i wyczyścić ją w myjce ultradźwiękowej, np. u-sonic 3. Następnie dobrze wysuszyć pod suszarką, np. dry-cap uv 3.1[®]. Wytrzeć filtr i diodę LED 3. Należy również przestrzegać instrukcji pielęgnacji i obsługi aparatów słuchowych. Urządzenie vac-clean uv 2[®] jest bardzo energooszczędne. Bateria litowo-jonowa wymaga ładowania tylko wtedy, gdy jest rozładowana (patrz Pierwsze uruchomienie). ⓘ LED 1 świeci się na czerwono. Odkurzacz vac-clean uv 2[®] ma 3 poziomy ssania (ooo / oo / o) o różnej sile. Krótkie dotknięcie przycisku I/O umożliwi przełączanie między poziomami ssania w zależności od potrzeb podczas pracy.

! Ostrzeżenia

Unikać kontaktu z wodą! Urządzenie vac-clean uv 2[®] nie może być używane w pobliżu umywalk itp. Unikać naprężeń mechanicznych spowodowanych uderzeniami i upadkami! Urządzenia vac-clean uv 2[®] nie wolno używać w pobliżu ognia lub łatwopalnych przedmiotów! W przypadku usterek należy zwrócić urządzenie do sprzedawcy! Nie wolno demontować urządzenia! Dzieci należy nadzorować, aby nie używały urządzenia jako zabawki! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Zaleca się ostrożność w przypadku wszystkich krótkotrwałych zastosowań na ciele; w przypadku nieprawidłowości należy skonsultować się z lekarzem.



flow-med GmbH
Weinbergweg 10
73773 Aichwald
Germany



Otoplastic AG
Merkurstr. 4
9000 St. Gallen
Switzerland

Item No. 621 00000

Document No. IFU_62100000_2024-01-25

© 2010-2024 flow-med GmbH. All rights reserved.

www.flow-med.com

